



Lingettes de nettoyage pour l'hygiène quotidienne des paupières Avec aloe vera et hyaluronate de sodium

Pourquoi „ocuvers wipes“

„ocuvers wipes“ a été spécialement développé pour les soins tout en douceur du bord des paupières de l'œil sec et en cas d'irritation du bord des paupières.

„ocuvers wipes“ convient aux porteurs de lentilles de contact et aux enfants.

La douceur de l'hygiène des paupières

„ocuvers wipes“ peut être utilisé pour l'hygiène quotidienne des paupières tout en douceur en cas de blépharite ou de blépharo-conjonctivite.

Un massage des paupières permet de désobstruer les canaux meibomiens et d'éliminer ensuite les impuretés avec la lingette. Le nettoyage des bords de paupières sensibles n'élimine non seulement la graisse de la peau en excès, mais stimule également la production des glandes, ce qui permet d'améliorer la qualité du film lacrymal, ce qui à son tour assourdit le processus inflammatoire.

Les soins quotidiens du bord des paupières constituent un élément important de la thérapie des inflammations du bord des paupières ou de l'œil sec.

Pourquoi une hygiène des paupières

Entre-temps, l'œil sec (syndrome de Sjögren) est un problème de santé publique. Lorsqu'il n'est pas traité, in entraîne souvent une inflammation du bord des paupières (blépharite), qui en son tour favorise la progression du syndrome de Sjögren.

Les symptômes d'une inflammation du bord des paupières sont des yeux larmoyants, rougis ou fatigués ainsi qu'un bord des paupières gonflé et des paupières collées.


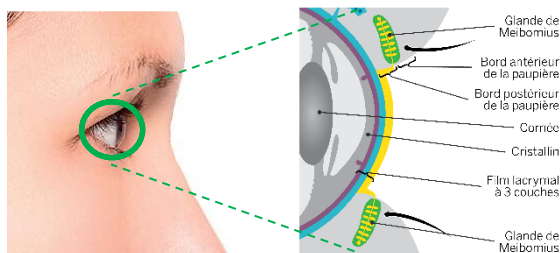


Illustration schématique du segment antérieur de l'œil

Les glandes de Meibomius bouchées constituent l'une des causes principales de l'inflammation du bord des paupières. Chaque œil a env. 70 de ces glandes réparties sur la paupière inférieure et supérieure. La fonction des glandes est la production de l'élément lipidique du film lacrymal, appelé couche lipidique.

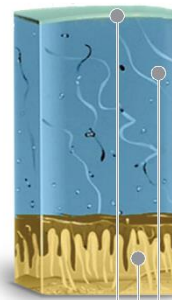


L'hygiène quotidienne des paupières est décisive pour le succès thérapeutique à long terme d'inflammation du bord des paupières et de l'œil sec. La dynamique croissante du cycle ne peut être interrompue avec succès que lorsque des collyres et/ou des sprays oculaires sont utilisés pour l'humidification et qu'en outre une hygiène de paupières quotidienne est appliquée en utilisant les lingettes afin d'éliminer les sécrétions et impuretés.

Domaine d'utilisation

„ocuvers wipes“ a non seulement un effet humidifiant et rafraîchissant grâce au hyaluronate de sodium, mais contribue également à éliminer toutes les impuretés et le maquillage autour de l'œil.

Utilisation de „ocuvers wipes“

Massage des paupières afin d'expulser les sécrétions des glandes de Meibomus

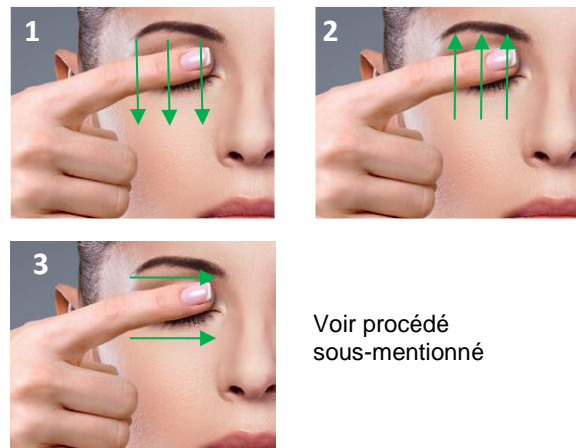

Voir procédé sous-mentionné

Exercez une légère pression avec l'index sur la paupière supérieure et massez plusieurs fois du haut en bas (1) et sur la paupière inférieure de bas en haut jusqu'à la fente de la palpébrale (2) et ensuite horizontalement de l'extérieur vers l'intérieur en direction du dos du nez (3). Répétez ces mouvements plusieurs fois.

Hygiène des paupières pour le nettoyage et l'élimination des croûtes et des impuretés



Voir procédé
sous-mentionné

Massez doucement avec la lingette „ocucvers wipes“ sur la paupière supérieure du haut en bas (1), sur la paupière inférieure de bas en haut en direction de la fente de la palpébrale (2) et ensuite horizontalement de l'extérieur vers l'intérieur en direction du dos du nez (3). Répétez le nettoyage des paupières aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que toutes les impuretés aient disparues.

Caractéristiques du produit

Chaque lingette „ocucvers wipes“ est imbibée d'une solution d'aloë vera et de hyaluronate de sodium et ensuite emballée individuellement. Elle ne contient pas d'agent conservateur comme le chlorure de benzalkonium, la chlorhexidine, le thiomersal, l'EDTA ou le phénoxyéthanol et renonce aux additifs tel que les paraffines, les cires ou les parabènes.

Littérature

Documents complémentaires en original auprès de Innomedis AG