




Une lentille de contact mensuelle torique contenant 54% d'eau, biocompatible au design nouvellement développé et un filtre anti-UV intégré.

Conception

Le matériau BioLens® « Vitafilcon A », particulièrement bien toléré, a permis de développer la lentille à renouvellement mensuel « Contaview premium toric UV » absolument biocompatible.

Pour conférer les propriétés positives de la cornée humaine au matériau des lentilles, des éléments de construction apparentés à ceux du corps humain ont été intégrés à une structure polymère artificielle. Ainsi, « Contaview premium toric UV » est une lentille de contact particulièrement bien tolérée.

Cette lentille convient également aux yeux tendanciellement secs et sensibles, notamment en raison de sa grande capacité de rétention d'eau et de ses excellentes propriétés de lubrification.

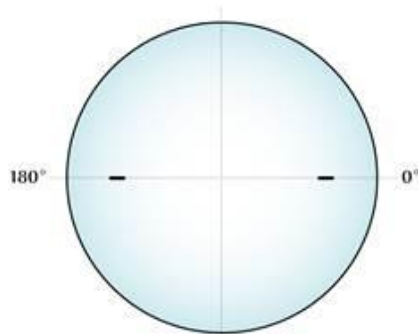

Position des gravures

Une excellente tolérance spontanée et à long terme de la lentille est obtenue en particulier également par le design nouvellement développé du bord. Lors du battement des paupières, une interaction en douceur entre les paupières et la lentille conduit à un excellent confort de port.

Cette construction torique optimisée de la lentille avec stabilisation dynamique symétrique permet un positionnement rapide et constant de la lentille de contact et assure par sa géométrie judicieusement équilibrée un haut degré de confort spontané et à long terme.

La lentille de contact « Contaview premium toric UV » est recommandée pour la correction des problèmes d'astigmatisme permettant une utilisation de lentilles standardisées.

Le matériau utilisé, « Vitafilcon A », contient un filtre anti-UV offrant à l'œil une protection supplémentaire contre les rayons nuisibles.

Données techniques

Matériau FDA groupe IV	Vitafilcon A (46%)
(filtre anti-UV, marginal ionique)	
Couleur pour manipulation	vert clair
Méthode de production	Moulage
Teneur en eau	54%
Surface antérieure	torique
Épaisseur médiane (avec -3.00 dpt)	0.10mm
Perméabilité à l'oxygène (Dk/L)	20
Zone optique	> 8.50mm
Stabilisation	dynamique symétrique
Marquage de l'axe	0° et 180°

Adaptation

Après la mise en place d'une lentille de contact sphérique mensuelle « Contaview premium UV », on pourra évaluer l'assise de la lentille, puis procéder à l'adaptation individuelle des lentilles par détermination de la réfraction avec la première lentille de diagnostic.

Il existe aussi la possibilité de mettre en place une première lentille de contact torique mensuelle « Contaview premium toric UV » (soit du set d'adaptation, soit en tant que lentille de diagnostic commandée), afin de définir les lentilles à prescrire sur la base de la stabilisation et de la détermination individuelle de la réfraction.

Les lentilles de contact doivent présenter une position centrée et réagir encore au bout de 4 heures de port par un léger glissement uniforme lors d'un battement de paupières ou d'un changement rapide de la direction du regard.

Critères supplémentaires:

- Une éventuelle empreinte du bord de la lentille de contact sur le tissu conjonctif doit être évitée.
- Une acuité visuelle stable doit être assurée.
- Aucune bulle d'air ne doit se former sous la lentille lors de sa mise en place sur l'œil.
- Quelle que soit la direction du regard, le bord de la lentille ne doit pas se détacher de la cornée / conjonctive.

Entretien des lentilles

Pour l'entretien des lentilles de contact « Contaview premium toric UV », CONTOPHARMA recommande la Solution Confort Universelle « simply one », la solution tout-en-un « Solution Universelle » ou le système d'entretien au peroxyde « tab in one », englobant la solution, les comprimés correspondants et l'étui spécial pour lentilles de contact.

Les solutions CONTOPHARMA Confort sont une excellente option pour une lubrification et réhydratation ultérieure des lentilles. En cas de faibles quantités de liquide lacrymal, la solution «drop&see» soutient grâce à sa composition équilibrée les fonctions cellulaires de la cornée. Par sa composition optimisée, la solution «lens&lid» protège les surfaces des LC contre les impuretés pendant le port.

Concept de port

Les lentilles de contact CONTOPHARMA «Contaview premium toric UV» sont recommandées pour un rythme de renouvellement mensuel.

Remarque importante

Les lentilles de contact avec filtre anti-UV ne peuvent pas remplacer d'autres aides optiques (lunettes correctives ou lunettes de soleil) munies d'une protection anti-UV. L'utilisateur doit continuer à se protéger par des moyens appropriés complémentaires contre les rayons nuisibles. Il n'a pas encore été démontré dans quelle mesure les lentilles de contact avec filtre anti-UV peuvent influencer la fréquence de modifications de l'œil dues aux rayons UV.

Produits disponibles, emballages:

Produits disponibles:

Diamètre	mm	14.40
Courbure de base	mm	8.60
Puissance	dpt	
Minus	dpt	plan à -6.00 (intervalles de 0.25 dpt) -6.50 à -8.00 (intervalles de 0.50 dpt)
Plus	dpt	plan à +4.00 (intervalles de 0.25 dpt)
Valeurs cylindre	dpt	-0.75, -1.25, -1.75 -2.25, -2.75
Axes	°	0 bis 180 (intervalles de 10°)

Emballages: boîtes de 6 lentilles en blister