



Augentropfen mit 0.21% Natriumhyaluronat und Elektrolyten Ohne Konservierungsmittel

Indikationen und Anwendungsbereich

„ocuers drops RELIEF“ eignet sich besonders bei Fremdkörpergefühl, Umweltstress, zum Beispiel bei Klimaanlage, Zugluft, Kälte, Trockenheit oder Schadstoffbelastungen. Pflegt, durch beispielsweise intensive Arbeit an Computerbildschirmen sowie bei langen Autofahrten oder Reisezeiten strapazierte Augen. „ocuers drops RELIEF“ ist ideal zur Nachbenetzung für alle Arten von Contactlinsen. Eignet sich für langfristige Anwendung.

Einfache Anwendung

- Die Pumpflasche ist ohne Kraftaufwand komfortabel zu bedienen.
- Die einfach zu dosierende, patentierte Pumpflasche ermöglicht eine einfache Handhabung und eine hohe Therapietreue auch bei empfindlichen Augen, auch bei älteren Personen.
- Tropferspitze nicht berühren und nicht am Auge aufsetzen.
- Kopf nicht in den Nacken legen Augenlid mit dem Finger spreizen und den Tropfen in den äusseren Lidwinkel geben.
- Empfohlen werden 1-2 Tropfen pro Anwendung, nach Bedarf mehrmals täglich.

Produkteigenschaften

- Frei von Konservierungsmitteln
- 3-FACH WIRKFORMEL:
BIOVERFÜGBAR
Hyaluron kann die Verweildauer der applizierten Substanzen auf dem Auge verlängern und verbessert die Benetzung.
MIT ELEKTROLYTEN
Mineralstoffe wie Natrium, Magnesium, Kalium und Calcium fördern die Wiederherstellung des natürlichen Tränenfilms.
VERTRÄGLICH
Geeignet für alle Kontaktlinsenarten zur Unterstützung des Tragekomforts.
- Schützt das Auge vor Trockenheit, Reizung und Müdigkeit.
- Erhält den Tränenfilm zum besseren Schutz des Auges.
- Enthält keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs.

- Verbessert den Tragekomfort bei Irritationen durch Contactlinsen.

Weitere Hinweise

- Im Fall von Irritationen Produkt nicht mehr verwenden und den Augen-Spezialisten aufsuchen.
- Nicht verwenden, wenn eine Allergie auf einen Inhaltsstoff besteht.
- Vor Licht und Hitzequellen schützen, bei Temperaturen von 4 – 30°C aufbewahren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht einnehmen.
- Nicht über Verfalldatum hinaus verwenden.
- Nicht länger als 6 Monate nach Anbruch des Behälters verwenden.
- Steril bis zur ersten Verwendung.

Zusammensetzung

Klassifizierung in Klasse IIb Medizinprodukt.

Sterile, isotone Lösung mit Natriumhyaluronat 0,21%, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumphosphat, Citratpuffer, Sorbitol, Wasser.

Frei von Chlorhexidin, Thiomersal, Benzalkoniumchlorid, Phenoxyethanol.

Gebrauch nach Öffnen des Behälters: 6 Monate
Nicht nach dem Verfalldatum verwenden.

Konfektion: 10ml Pumpflasche

Literatur

Alle Unterlagen im Original bei:
INNOMEDIS AG
Walther-Rathenau-Strasse 5
D-50996 Köln
info@ocuers.eu