





## Le système d'entretien non abrasif et ménageant adapté à toutes les lentilles de contact rigides perméables au gaz

### Conception

Les solutions «Nettoyant N» et «Conservant C» sont accordées de façon idéale afin de prodiguer des soins ménageant aux lentilles de contact et d'assurer un confort optimal du port.

#### «Nettoyant N» de Contopharma

La solution «Nettoyant N» est le résultat d'un long développement<sup>1</sup> ayant eu pour but la recherche d'une formule à une capacité élevée de nettoyage tout en évitant des irritations excessives lors du contact direct avec l'œil. Le résultat est une solution non-abrasive à base de substances tensioactives qui ménagent les lentilles. «Nettoyant N» de Contopharma est dépourvu d'agents désinfectants contenant des métaux lourds.

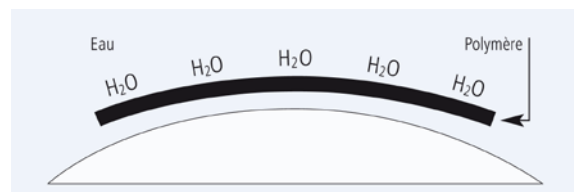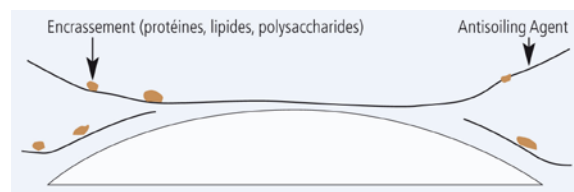

Encrassement avant et après le nettoyage. A gauche: Des dépôts rendus visibles à l'aide d'un colorant bleu. A droite: Une lentille nettoyée avec un produit commercialisé courant. Au milieu: Une lentille traitée avec la solution «Nettoyant N»<sup>1</sup>.

#### «Conservant C» de Contopharma

«Conservant C» de Contopharma est une solution de rinçage et de conservation polyfonctionnelle destinée aux lentilles de contact rigides perméables au gaz. Elle maintient la lentille dans son état hydratée et isotonique et inhibe la croissance de micro-organismes contaminants sans que l'agent conservateur, compatible avec les muqueuses, s'accumule à la surface des lentilles de contact. Un mélange particulier de polymères combinés («antisoiling agent») rend la lentille de contact hydrophile ce qui optimise le confort du port, facilite le nettoyage («antisoiling effect») et empêche largement les dépôts divers. Le danger d'immuno-réactions secondaires (rougeurs des yeux, GPC, etc.) est ainsi réduit à un minimum.

### Autres informations

Pour l'humectant à effet nettoyant, nous vous conseillons la solution confort «drop&see» pour des yeux avec des larmes minimes, et «lens&lid» en cas de film lacrymal fortement lipidique. «drop&see» assure sa fonction principale humectante de manière sûre et particulièrement agréable et renforce le fonctionnement cellulaire grâce à ses composants parfaitement équilibrés. Avec «lens&lid», la lentille de contact est protégée contre les dépôts pendant le port.

<sup>1</sup>data on file: Contopharma AG, Interlaken